



MESI

Simplifying Diagnostics

Stručný návod

MESI SPO2 MODULE


Modul pulzního oxymetru

CO JE V KRABICI?

Jednotka MESI pulzní oxymetr

FingerClip Sensor (CS10299)

Model
SPO2MD

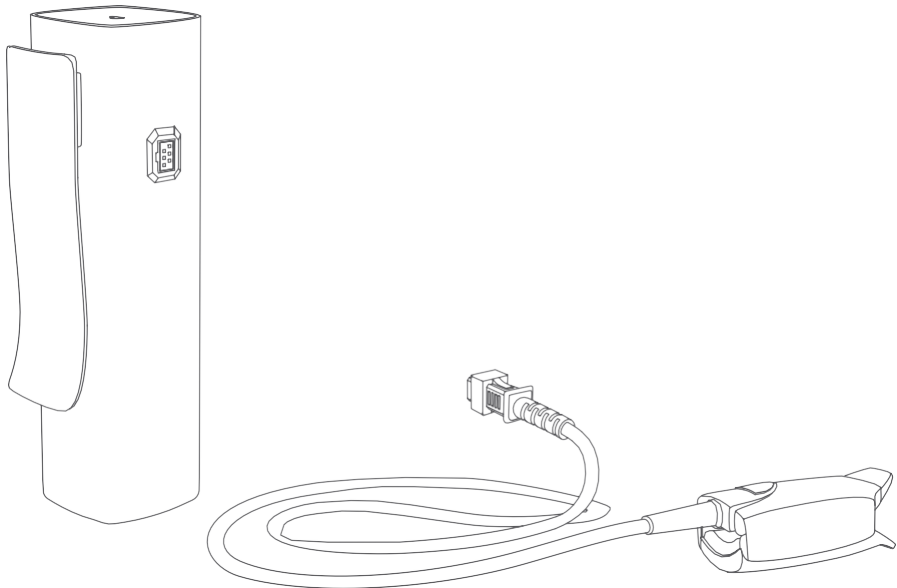



Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte doporučení uvedená zde: www.mesimedical.com/support/mTABLET/IFU.

PRVNÍ POUŽITÍ

1. Zapojte sensor do jednotky



Používejte pouze příslušenství a další díly doporučené společností MESI. Používání jiných než doporučených nebo dodaných dílů může mít za následek úraz, nepřesné informace a/nebo poškození zařízení. Tento výrobek není určen ke sterilnímu použití.

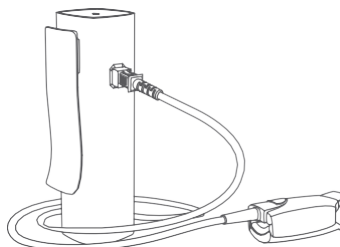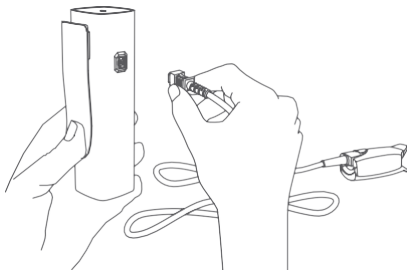

2. Příprava pacienta

Krok 1 – Volba správného SpO2 senzoru

Vyberte požadovaný senzor SpO2 v závislosti na kategorii pacienta, hmotnosti a místě aplikace.


Krok 2 - Přiložte senzor SpO2 k pacientovi

Očistěte místo aplikace, odstraňte bariéry (barevný lak na nehty, zaschlou krev atd.) a přiložte senzor k pacientovi.




Dodržujte návod k použití, který je dodáván se snímačem pulzního oxymetru.

3. Přidat/vybrat pacienta

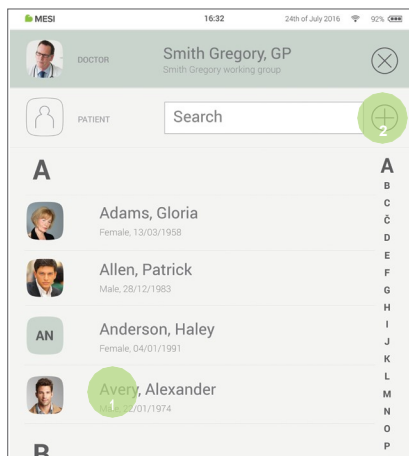


Na své MESI mTABLET UNIT vyberte stávajícího pacienta (1) nebo přidejte nového (2).

4. Volba měření

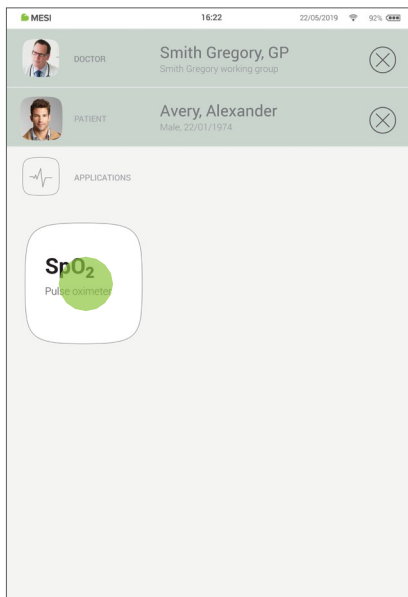

Po volbě pacienta zvolte v nabídce aplikace měření SpO₂.


5. Přiložte senzor

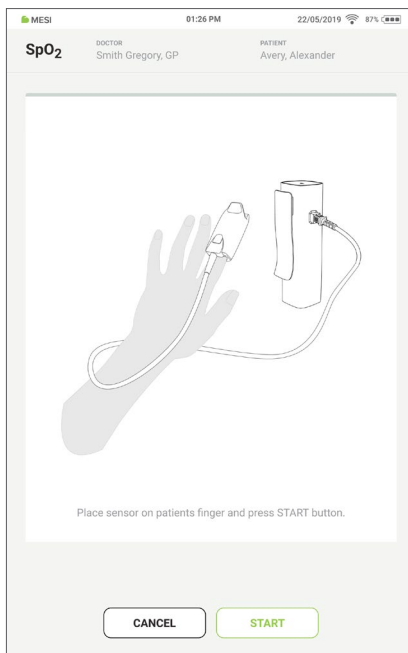

Přiložte senzor SpO₂ na správné místo aplikace.


6. Proved'te měření

Stiskněte tlačítko START (1) pro zahájení měření.

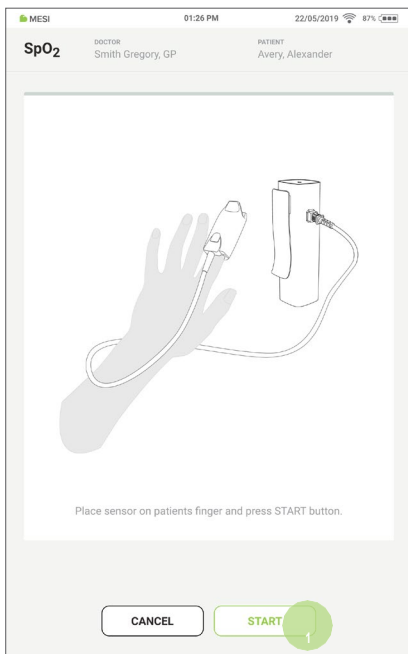

Hodnota SpO2 bude zaznamenána po HOTOVO

Tlačítko (2) je potvrzeno. Obrazovka MESI mTABLET UNIT bude automaticky pokračovat na stránku s výsledky, kde se rolováním nahoru a dolů zobrazí další informace o měření.

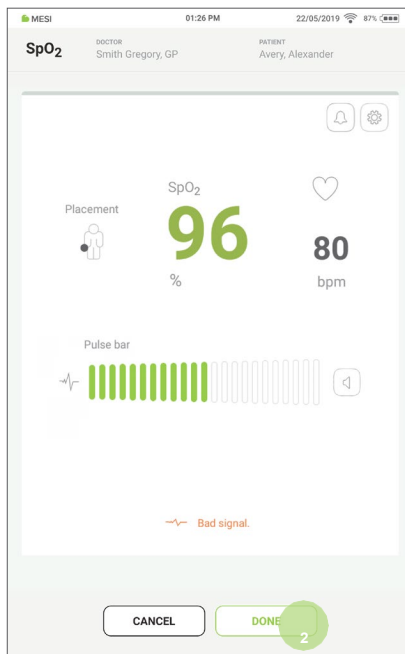

7. Kontrola měření SpO2

The screenshot shows a mobile application interface for SpO2 monitoring. The interface includes a header with patient information, a main display for current SpO2 and heart rate, a history graph, and a comment section. Green lines and text labels point to various UI elements.

Annotations:

- Navigační pole:** Points to the navigation bar at the top containing back, forward, refresh, share, delete, and done buttons.
- Hodnoty SpO2 a srdeční frekvence:** Points to the current SpO2 value (98%) and heart rate (125 bpm).
- Historie záznamů SpO2 pacienta:** Points to the line graph showing SpO2 history over time.
- Komentár:** Points to the text input field for adding a comment.
- Navigační pole:** Points to the 'DONE' button at the bottom of the screen.
- Přejít na: předchozí/další výsledky:** Points to the left and right navigation arrows.
- Opakujte měření:** Points to the refresh button.
- Sdílet pro další názor:** Points to the share button.
- Vymazat výsledek:** Points to the delete button.
- Místo aplikace senzoru:** Points to the sensor placement icon.

UI Elements:

- Header: MESI, 01:26 PM, 22/05/2019, 87% battery.
- Doctor: Smith Gregory, GP; Patient: Avery, Alexander.
- Current SpO2: 98%; Heart rate: 125 bpm.
- History graph: SpO2 (%) vs. Date (15-03-2014 to 25-04-2015).
- Comment section: Comment input field.
- Buttons: DONE (top right), DONE (bottom center).

UPOZORNĚNÍ



Neumísťujte senzor na rány, protože to může způsobit další zranění.



Nepoužívejte toto zařízení v oblastech, kde se vyskytují hořlavé plyny, jako jsou anestetika, nebo v prostředí bohatém na kyslík.



MESI SPO2 MODUL je součástí systému MESI mTABLET SPO2. Před zahájením měření se ujistěte, že jste obeznámeni se všemi zařízeními a jejich pokyny, které jsou součástí systému. MESI mTABLET SPO2 se skládá z MESI mTABLET (MTABSYSW), MESI SPO2 MODULE (SPO2SYS) a MESI LARGE CHARGING PLATE (CS4SYS).



MESI mTABLET SPO2 není určen pro nepřetržité monitorování.



Uživatelé MESI mTABLET SPO2 musí být náležitě vyškoleni k používání zařízení. Před prvním použitím zařízení si uživatelé musí pečlivě přečíst celý návod k použití a řídit se návodem k použití připojeného zařízení.



Tento výrobek není určen pro sterilní použití.



Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku úniku proudu, používejte pouze AC/DC napájecí zdroje, které jsou v souladu s technickými specifikacemi zařízení.



Používejte pouze příslušenství a další díly doporučené nebo dodávané společností MESI. Použití jiného než doporučené nebo dodávané díly mohou způsobit zranění, nepřesné informace a/nebo poškození jednotky. Postupujte podle pokynů dodaných s konkrétním příslušenstvím.