


Surgi-Max Drill Pokyny pro balení kufru

Viz podrobné poznámky na zadní straně

TENTO DOKUMENT JE POUZE PRO BALENÍ / PŘEPRAVU VRTACÍCH NÁSTROJŮ SURGI-MAX. POKYNY KE STERILIZACI, PROSÍM, OVĚŘTE V IN0089.

SPODNÍ VRSTVA	
Č.	Popis
1	Surgi-Max Drill řídicí jednotka
2	Nožní spínač (pedál)
3	Napájecí kabel
4	Úhlový nástavec (v dolní dutině a v modrém pouzdru)
5	Kloubový nástavec a nástroj k vyjímání fréz (v originální pěnovce)

HORNÍ VRSTVA	
Č.	Popis
6	Univerzální sterilizační síto
7	Motor včetně kabelu
8	Kloubové frézy (prodáváno samostatně)
9	Vodící trubičky a frézy pro úhlový nástavec (prodává se samostatně)

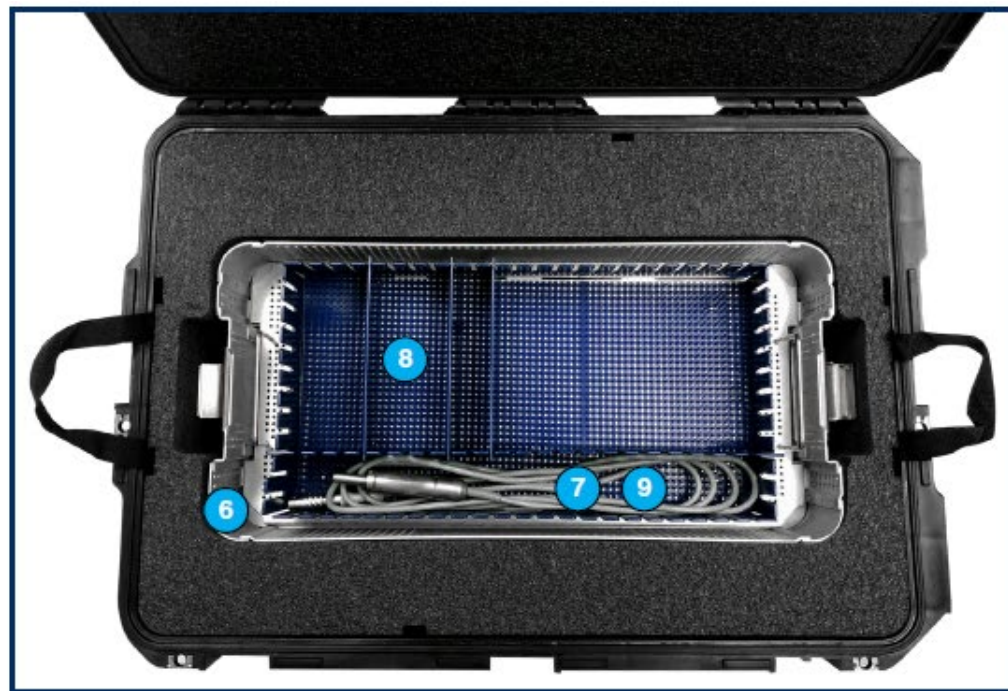

Spodní vrstva - nástavec

- A) Úhlový nástavec by měl být zabalen do modrého pouzdra, ve kterém byl původně dodán. Umístěte modré plastové pouzdro pro úhlový násadec do nejnižší dutiny ve spodní vrstvě. (viz. níže)
- B) Kloubové frézy jsou dodávány s pěnovou vložkou. Umístěte nástavec bez vložené frézy do dutiny v pěnovce. Tato pěnová vložka bude umístěna ve stejné dutině jako předchozí úhlový nástavec. (viz. níže)



Horní vrstva - univerzální sterilizační síť

- C) Univerzální sterilizační síť se skládá z víka, zásobníku a spodního pouzdra. 3 přepážky uvnitř zásobníku jsou pohyblivé, aby poskytly variabilitu umístění sterilizovaných nástrojů.

Modré pouzdro pro úhlový nástavec



Pěnová vložka pro kloubový nástavec

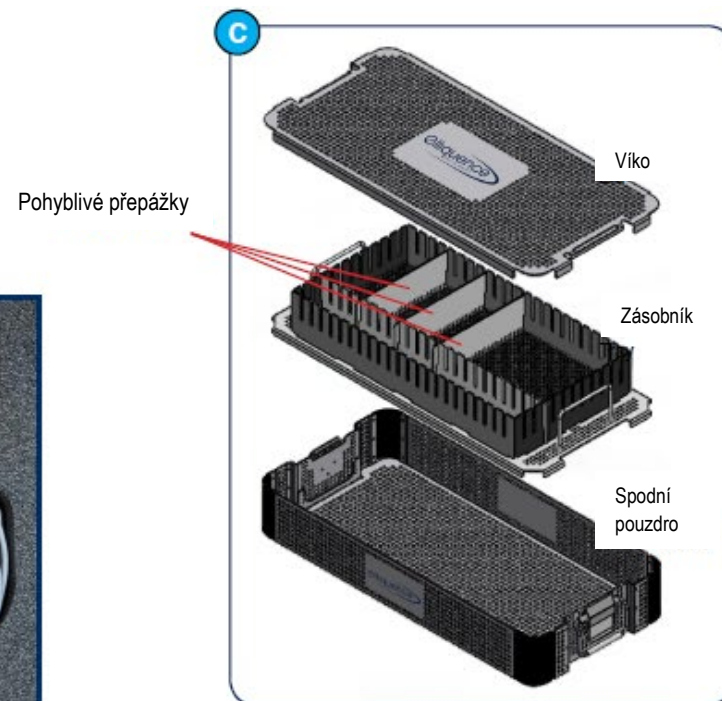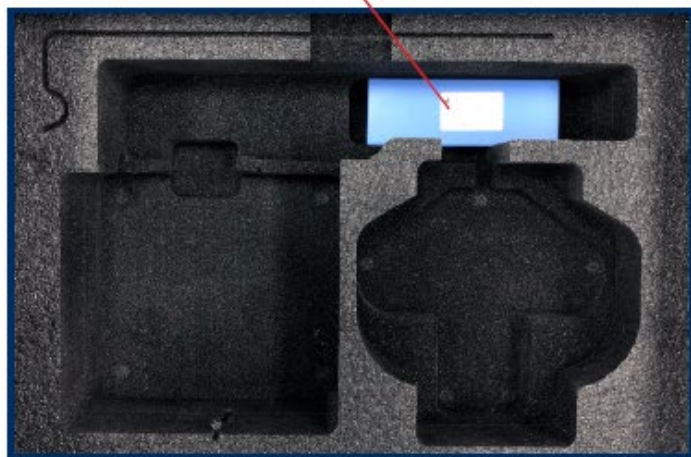

elliquence, LLC.
 2455 Grand Avenue, Baldwin, NY 11510 • www.elliquence.com
 Telefon: (516) 277-9000 • Fax: (516) 277-9001
 Copyright 2017 © elliquence, LLC. All Rights Reserved
 IN 0098 A